

Aqua

Circuito interlaboratorio
per l'assicurazione qualità
dei risultati

Circuito diagnostica bovina e suina mediante tecniche sierologiche
Report parziale Schema AQUA SI 4-21
Marzo 2022



**Circuito interlaboratorio AQUA SI / 2021
SCHEMA AQUA SI 4-21**

**Identificazione anticorpi verso *NEOSPORA caninum* nel siero di sangue bovino
Report parziale**

1. Caratteristiche e composizione dei campioni

- Campione 1:** Siero di vacca con aborto positivo PCR
Campione 2: Siero di vacca con aborto positivo PCR
Campione 3: Siero di vacca con aborto positivo PCR
Campione 4: Siero di vacca con aborto positivo PCR (campione n.3) diluito 1:16 con siero da az. storicamente negativa
Campione 5: Siero di vacca con aborto positivo PCR (campione n.3) diluito 1:32 con siero da az. storicamente negativa
Campione 6: Pool sieri da azienda storicamente negativa (Elisa e IFAT)
Campione 7: Pool sieri da azienda storicamente negativa (Elisa e IFAT)
Campione 8: Pool sieri da azienda storicamente negativa (Elisa e IFAT)
Campione 9: Siero di vacca con aborto positivo PCR
Campione 10: Siero di vacca con aborto positivo PCR

2. Determinazioni e risultati attesi

Sugli stessi campioni sono state effettuate le seguenti prove:

- la ricerca di anticorpi mediante metodica ELISA
- la ricerca di anticorpi mediante IFAT

I risultati attesi delle suddette prove, espressi come POSITIVO o NEGATIVO sono riportati nella tabella sottostante:

anticorpi verso <i>NEOSPORA caninum</i> nel siero di sangue bovino			
CP	NEO/A ELISA	NEO/A IFAT	
1	POS	POS	POS 1:640
2	POS	POS	POS 1:160
3	POS	POS	POS 1:640
4	POS	POS	POS 1:80
5	POS	POS	POS 1:40
6	NEG	NEG	NEG
7	NEG	NEG	NEG
8	NEG	NEG	NEG
9	POS	POS	POS 1:320
10	POS	POS	POS 1:320

Data report parziale 14/03/2022 (in attesa del report definitivo)



Responsabile del circuito interlaboratorio
Dr. ssa Lucia Selli

Responsabile Circuito interlaboratorio AQUA SI
Dr.ssa Lucia Selli Fax 049 8084351 Tel. 049 8084354
e-mail lselli@izsvenezie.it

Responsabile statistico
Dr.ssa Marzia Mancin Fax 049 8830268 Tel. 049 8084252
e-mail mmancin@izsvenezie.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Struttura Complessa Territoriale 3 (SCT3)
V.le dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)
www.izsvenezie.it

----- Fine report parziale -----

