

ANIMALI DA COMPAGNIA

Esami di laboratorio

PARASSITOLOGIA E MICOLOGIA

SPECIE	ESAME	CAMPIONE	QTÀ MINIMA	TEMPI DI CONSEGNA	CONSERVAZIONE E TRASPORTO	NOTE	CONSIGLI	Contatti
TUTTE LE SPECIE	Emoparassiti (colorazione Diff-quick®)	Sangue strisciato a fresco al momento del prelievo e/o provetta di sangue intero in K3EDTA	1 ml	Entro 48h se si consegna sangue intero in K3EDTA	2-8 °C	Non congelare, preferibilmente fissare il vetrino in metanolo, non colorare il vetrino	Si consiglia, se possibile, di inviare sia lo striscio a fresco che il sangue intero in K3EDTA. Scrivere nella banda sabbiata a matita	Legnaro (Pd) - Laboratorio parassitologia dott.ssa Gioia Capelli tel. 049-8084292 e-mail: gcapelli@izsvenezie.it dott.ssa Patrizia Danesi tel. 049-8084476 e-mail: pdanesi@izsvenezie.it
CANE E GATTO	Esame coprologico qualitativo	Feci	2 gr	Non necessita di consegna urgente se conservato a T di refrigerazione	2-8 °C			<p>Legnaro (Pd) - Laboratorio parassitologia dott.ssa Gioia Capelli tel. 049-8084292 e-mail: gcapelli@izsvenezie.it dott.ssa Patrizia Danesi tel. 049-8084476 e-mail: pdanesi@izsvenezie.it</p> <p>Treviso - Laboratorio diagnostica e sierologia di piano dott. Luca Bano tel. 0422-302302 e-mail: lbano@izsvenezie.it</p> <p>Verona - Laboratorio diagnostica clinica e sierologia di piano dott. Nicola Pozzato tel. 045-500285 e-mail: npozzato@izsvenezie.it</p> <p>Pordenone - Laboratorio diagnostica clinica dott.ssa Martina Ustulin tel. 0434-41405 e-mail: mustulin@izsvenezie.it</p> <p>Udine - Laboratorio diagnostica clinica dott.ssa Monia Cocchi tel. 0432-561529 e-mail: mcocchi@izsvenezie.it</p> <p>Trento - Laboratorio diagnostica clinica e sierologia di piano dott.ssa Debora Dellamaria tel. 0461-822458 e-mail: ddellamaria@izsvenezie.it</p> <p>Bolzano - Laboratorio diagnostica clinica dott.ssa Karin Trevisiol tel. 0471-633062 e-mail: ktrevisiol@izsvenezie.it</p>
CANE E GATTO	Esame coprologico quantitativo	Feci	4 gr	Non necessita di consegna urgente se conservato a T di refrigerazione	2-8 °C			<p>Legnaro (Pd) - Laboratorio parassitologia dott.ssa Gioia Capelli tel. 049-8084292 e-mail: gcapelli@izsvenezie.it dott.ssa Patrizia Danesi tel. 049-8084476 e-mail: pdanesi@izsvenezie.it</p> <p>Treviso - Laboratorio diagnostica e sierologia di piano dott. Luca Bano tel. 0422-302302 e-mail: lbano@izsvenezie.it</p>

SPECIE	ESAME	CAMPIONE	QTÀ MINIMA	TEMPI DI CONSEGNA	CONSERVAZIONE E TRASPORTO	NOTE	CONSIGLI	Contatti
CANE E GATTO	Filaria (ELISA)	Siero, plasma (preferibili) o sangue intero con anticoagulante	1 ml	Non necessita di consegna urgente se conservato a T di refrigerazione (entro 5 gg)	2-8 °C			Legnaro (Pd) - Laboratorio parassitologia dott.ssa Gioia Capelli tel. 049-8084292 e-mail: gcapelli@izsvenezie.it dott.ssa Patrizia Danesi tel. 049-8084476 e-mail: pdanesi@izsvenezie.it
CANE E GATTO	Filaria (filtrazione)	Sangue con un qualsiasi anticoagulante	2 ml	Non necessita di consegna urgente se conservato a T di refrigerazione (entro 5 gg)	2-8 °C			
CANE	<i>Angiostrongylus vasorum</i> (ELISA)	Siero o sangue con un qualsiasi anticoagulante	2 ml	Non necessita di consegna urgente se conservato a T di refrigerazione (entro 5 gg)	2-8 °C			
CANE E GATTO	Identificazione tassonomica	Ectoparassiti	Possibilmente più esemplari	Se in vita conservare a temperatura ambiente a secco, se morti refrigerati e a secco.		Importante: indicare il sito di prelievo (animale, ambiente, lettiera, ecc.)		
CANE E GATTO	Identificazione tassonomica	Endoparassiti	Possibilmente più esemplari	Il prima possibile se refrigerati	Conservare refrigerati se la consegna avviene in tempi rapidi, altrimenti congelati o in alcol etilico 70-90%	Importante: indicare il sito di prelievo (animale, ambiente, altro, ecc.)		
CANE E GATTO	Ricerca acari della rogna	Raschiato cutaneo, croste		Non necessita di consegna urgente se conservato a T di refrigerazione	Conservare refrigerati		In caso di sospetto demodicosi prelievo da scarificazione della cute un po' più profondo	Legnaro (Pd) - Laboratorio parassitologia dott.ssa Gioia Capelli tel. 049-8084292 e-mail: gcapelli@izsvenezie.it dott.ssa Patrizia Danesi tel. 049-8084476 e-mail: pdanesi@izsvenezie.it Treviso - Laboratorio diagnostica e sierologia di piano dott. Luca Bano tel. 0422-302302 e-mail: lbano@izsvenezie.it Udine - Laboratorio diagnostica clinica dott.ssa Monia Cocchi tel. 0432-561529 e-mail: mcocchi@izsvenezie.it Trento - Laboratorio diagnostica clinica e sierologia di piano dott.ssa Debora Dellamaria tel. 0461-822458 e-mail: ddellamaria@izsvenezie.it Bolzano - Laboratorio diagnostica clinica dott.ssa Karin Trevisiol tel. 0471-633062 e-mail: ktrevisiol@izsvenezie.it

SPECIE	ESAME	CAMPIONE	QTÀ MINIMA	TEMPI DI CONSEGNA	CONSERVAZIONE E TRASPORTO	NOTE	CONSIGLI	Contatti
CANE E GATTO	<i>Giardia</i> e/o <i>Cryptosporidium</i> (immunofluorescenza)	feci	4 gr	Non necessita di consegna urgente se conservato a T di refrigerazione	2-8 °C	Metodo semi-quantitativo. L'esito viene fornito con indicazione del numero di cisti/oocisti per grammo	Nei casi asintomatici, per <i>Giardia</i> spp. si consiglia di fare 3 campionamenti che verranno esaminati in pool	Legnaro (Pd) - Laboratorio parassitologia dott.ssa Gioia Capelli tel. 049-8084292 e-mail: gcapelli@izsvenezie.it dott.ssa Patrizia Danesi tel. 049-8084476 e-mail: pdanesi@izsvenezie.it Udine - Laboratorio diagnostica clinica dott.ssa Monia Cocchi tel. 0432-561529 e-mail: mcocchi@izsvenezie.it
CANE	<i>Leishmania</i> spp (colorazione Diff-quick®)	Sangue intero con anticoagulante, puntato linfonodale o midollare, striscio su vetrino	Sangue 1 ml	Il prima possibile	Sangue: 2-8 °C Strisci: T ambiente Puntato linfonodale: in PBS o tal quale 2-8 °C Puntato midollare: in K3EDTA 2-8°C	Preferibilmente fissare gli strisci in metanolo, in particolare se la consegna non è immediata. Per i puntati utilizzare poco liquido, sufficiente a coprire il materiale		Legnaro (Pd) - Laboratorio parassitologia dott.ssa Gioia Capelli tel. 049-8084292 e-mail: gcapelli@izsvenezie.it

SPECIE	ESAME	CAMPIONE	QTÀ MINIMA	TEMPI DI CONSEGNA	CONSERVAZIONE E TRASPORTO	NOTE	CONSIGLI	Contatti
CANE E GATTO	Esame colturale	Cute, raschiato pelo, tampone (cute, naso, orecchio, ecc), BAL, materiale aspirato (cisti, noduli, ecc), frammento biotico da varie sedi		Per tamponi e materiali biologici consegna entro 2 giorni (altrimenti congelare a -18°C). Per campioni cutanei consegna entro 4-5 giorni	Tamponi e materiali biologici 2-8°C; campioni cutanei a temperatura ambiente	Allegare una dettagliata anamnesi e descrizione clinica del paziente	Non è possibile effettuare l'esame batteriologico dal tampone inviato per la ricerca micologica (inviare un tampone separato). Se si desidera effettuare l'esame batteriologico inviare il campione al laboratorio di microbiologia	<p>Legnaro (Pd) - Laboratorio parassitologia dott.ssa Gioia Capelli tel. 049-8084292 e-mail: gcapelli@izsvenezie.it</p> <p>dott.ssa Patrizia Danesi tel. 049-8084476 e-mail: pdanesi@izsvenezie.it</p> <p>Treviso - Laboratorio batteriologia speciale dott.ssa Laura Viel tel. 0422-302302 e-mail: lviel@izsvenezie.it</p> <p>Verona - Laboratorio diagnostica clinica e sierologia di piano dott. Nicola Pozzato tel. 045-500285 e-mail: npozzato@izsvenezie.it</p> <p>Pordenone - Laboratorio diagnostica clinica dott.ssa Martina Ustulin tel. 0434-41405 e-mail: mustulin@izsvenezie.it</p> <p>Udine - Laboratorio diagnostica clinica dott.ssa Monia Cocchi tel. 0432-561529 e-mail: mcocchi@izsvenezie.it</p> <p>Bolzano - Laboratorio diagnostica clinica dott.ssa Karin Trevisiol tel. 0471-633062 e-mail: ktrevisiol@izsvenezie.it</p>
	Identificazione ceppi micotici (esame colturale)	Colonia su terreno colturale		Il prima possibile. Per informazioni contattare il laboratorio (tel. 049-8084380)	Chiudere bene con parafilm e refrigerare	Allegare una dettagliata anamnesi e descrizione clinica del paziente	<p>Legnaro (Pd) - Laboratorio parassitologia dott.ssa Gioia Capelli tel. 049-8084292 e-mail: gcapelli@izsvenezie.it</p> <p>dott.ssa Patrizia Danesi tel. 049-8084476 e-mail: pdanesi@izsvenezie.it</p>	

SPECIE	ESAME	CAMPIONE	QTÀ MINIMA	TEMPI DI CONSEGNA	CONSERVAZIONE E TRASPORTO	NOTE	CONSIGLI	Contatti
CANE E GATTO	Ricerca <i>Prototheca</i> (esame colturale)	Urine, tampone rettale, feci, materiale intestinale raccolto in endoscopia, aspirati linfonodali, aspirati da cisti, materiale bioptico		Il prima possibile (altrimenti congelare a -18°C).	Refrigerato entro 2 giorni. In alternativa mantenere congelato a -18°C			<p>Legnaro (Pd) - Laboratorio parassitologia dott.ssa Gioia Capelli tel. 049-8084292 e-mail: gcapelli@izsvenezie.it dott.ssa Patrizia Danesi tel. 049-8084476 e-mail: pdanesi@izsvenezie.it</p> <p>Treviso - Laboratorio batteriologia speciale dott.ssa Laura Viel tel. 0422-302302 e-mail: lviel@izsvenezie.it</p> <p>Udine - Laboratorio diagnostica clinica dott.ssa Monia Cocchi tel. 0432-561529 e-mail: mcocchi@izsvenezie.it</p> <p>Trento - Laboratorio diagnostica clinica e sierologia di piano dott.ssa Debora Dellamaria tel. 0461-822458 e-mail: ddellamaria@izsvenezie.it</p> <p>Bolzano - Laboratorio diagnostica clinica dott.ssa Karin Trevisiol tel. 0471-633062 e-mail: ktrevisiol@izsvenezie.it</p>
CANE	Ricerca <i>Malassezia</i> (esame colturale)	Tampone auricolare o cutaneo		Il prima possibile	Refrigerato a 2-8 °C. Tampone senza terreno di trasporto (addizionato di 1cc di fisiologica per evitarne l'essiccamento)	Allegare una dettagliata anamnesi e descrizione clinica del paziente	Non è possibile effettuare l'esame batteriologico dal tampone inviato per la ricerca micologica (inviare un tampone separato). Se si desidera effettuare l'esame batteriologico inviare il campione al laboratorio di microbiologia	<p>Legnaro (Pd) - Laboratorio parassitologia dott.ssa Gioia Capelli tel. 049-8084292 e-mail: gcapelli@izsvenezie.it dott.ssa Patrizia Danesi tel. 049-8084476 e-mail: pdanesi@izsvenezie.it</p> <p>Treviso - Laboratorio batteriologia speciale dott.ssa Laura Viel tel. 0422-302302 e-mail: lviel@izsvenezie.it</p> <p>Udine - Laboratorio diagnostica clinica dott.ssa Monia Cocchi tel. 0432-561529 e-mail: mcocchi@izsvenezie.it</p> <p>Trento - Laboratorio diagnostica clinica e sierologia di piano dott.ssa Debora Dellamaria tel. 0461-822458 e-mail: ddellamaria@izsvenezie.it</p> <p>Bolzano - Laboratorio diagnostica clinica dott.ssa Karin Trevisiol tel. 0471-633062 e-mail: ktrevisiol@izsvenezie.it</p>